

---

**OPIS PRODUKTU**

---

**SciCan**  
A HIGHER STANDARD

---

## Steryliizator kasetowy SciCan Statim 2000S

Statim 2000S, **grawitacyjny sterylizator kasetowy**, jest najszybszym z autoklawów dostępnych na rynku. Daje możliwość zastosowania **8 - minutowego cyklu sterylizacji**. Pozwala na wielokrotną sterylizację w ciągu dnia pracy i chroni narzędzia przed korozją. Niezawodność, ekonomiczność i prosta obsługa sprawiły, że w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Statim jest niemal w co drugim gabinecie stomatologicznym.





Statim jako jedyny grawitacyjny sterylizator został dopuszczony przez FDA (Food & Drug Administration) w USA **do sterylizacji końcówek stomatologicznych**, a testy, dokonane z końcówkami KaVo udowodniły, że po kilku tysiącach cykli sterylizacji, końcówki i ich podzespoły nie wykazywały żadnych zmian mechanicznych. Statim zapewnia usunięcie z komory sterylizacyjnej powyżej 99% powietrza, co

## OPIS PRODUKTU

w połączeniu z równomiernym, kontrolowanym przez mikroprocesor rozłożeniem temperatury wewnątrz kasety, stwarza **idealne warunki do przeprowadzenia cyklu sterylizacji**.

Dzięki zastosowaniu cienkościennej kasety i kompaktowej, wysoce wydajnej opatentowanej wytwornicy pary, pojedynczy cykl został skrócony do około 8 min. w Statim 2000S. Po zakończeniu cyklu, jeśli operator nie wyjmie kasety natychmiast z urządzenia i nie otworzy jej, wbudowany kompresor włącza się automatycznie i przez 1 godzinę tłoczy powietrze, które usuwa z kasety parę wodną oraz chłodzi i suszy instrumenty. Jeśli mamy do czynienia ze sterylizacją narzędzi niezapakowanych, już po niespełna 4 minutach mogą one być używane.

Cykle w Statim 2000s:

Przycisk	Nazwa cyklu	Temp. sterylizacja	Czas trwania sterylizacji (w min.)	Czas trwania cyklu (w min.)
	Instrumenty lite Niezapakowane	134°C	<b>3:30</b>	<b>6:45</b>
	Instrumenty z otworami Niezapakowane	134°C	<b>3:30</b>	<b>8:05</b>
	Instrumenty z otworami Niezapakowane	134°C	18:00	22:35
	Instrumenty z otworami Zapakowane	134°C	3:30	10:40
	Instrumenty z otworami Zapakowane	134°C	18:00	25:10
	Guma/ Plastik	121°C	15:00	18:40
	Guma/ Plastik	121°C	30:00	33:40
	Cykl dodatkowego suszenia powietrzem			

**OPIS PRODUKTU**

Specyfikacja:

<b>Statim 2000S</b>	
<b>Wymiary urządzeń</b>	
Głębokość:	48,5 cm
Szerokość:	41,5 cm
Wysokość:	15,0 cm
<b>Wymiary kasy zewnętrzne</b>	
Głębokość:	41,0 cm
Szerokość:	19,5 cm
Wysokość:	4,0 cm
<b>Wymiary kasy wewnętrzne</b>	
Głębokość:	28,0 cm
Szerokość:	18,0 cm
Wysokość:	4,0 cm
<b>Pojemność komory kasy sterylizacyjnej</b>	1,8 litra
<b>Pojemność zbiornika wody destylowanej</b>	4,0 litra
<b>Waga</b>	21,0 kg
<b>Minimalne odległości ustawienia</b>	
Od góry:	50 mm
Z tyłu:	50 mm
Z boku:	50 mm
Z przodu:	48 mm
<b>Ciśnienie pracy</b>	3 bar
<b>Zasilanie</b>	220 – 240 V, 50 Hz, 6 A